

Samoutovariva nosila SPENCER 506 - 510

-Izvod iz uputstava za rukovanje –

Ovo uputstvo namijenjeno je korisniku sa svrhom da ga informira o svim neophodnim radnjama kako bi nosila koristio na pravilan i najsigurniji način.

PRIJE KORIŠTENJA MOLIMO PROČITAJTE OVO UPUTSTVO PAŽLJIVO !!!

2. OPIS NOSILA

2.1. Namjena nosila

Dvodjelna samoutovariva nosila 506 + 510 namijenjena su transportu unesrećenika prilikom radnji spašavanja.

Prilikom utovara, noge sa kotačima stretchera sklapaju se pojedinačno, koristeći se posebnim komandama za prednje i stražnje noge, dok se kod istovara noge otvaraju automatski.

Ležaj stretchera izrađen je iz visokootpornog polyetilena idealnog za jednostavno održavanje.

Fiksni prednji kotači i pokretni stražnji kotači omogućuju lagano manevriranje nosilima.

2.2. Osnovni dijelovi stretchera (slika str. 5 – uputstvo 510)

1. Upravljačka ručica prednjih sklopivih nogu
2. Upravljačka ručica stražnjih sklopivih nogu
3. Ušica za blokadu na vozilu
4. Teleskopske ručke odvojivog dijela Spencer 506
5. Gumb za oslobađanje gornjeg dijela 506, od postolja 510
6. Sistem brava za pričvršćivanje gornjeg dijela 506 na postolje 510
7. Teleskopska poluga sklopivo/nesklopivo za prednje noge
8. Teleskopska poluga sklopivo/nesklopivo za stražnje noge
9. Usmjerivač nosila (podesiva visina od 50 – 61 cm)
9. Upravljački kotač sa blokadom pravca

4. 1. KORIŠTENJE NOSILA

Pročitajte uputstvo pažljivo i vježbajte sa praznim nosilima prije korištenja u hitnim intervencijama!!!

4.2.1. TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA KOLA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Namjena samoutovarivog stretchera uvjetuje ispunjenje određenih tehničkih zahtjeva za efikasnu upotrebu:

- dovoljno prostora za manevar sa sklopivim nosilima
- zaobljeni rubovi unutrašnjosti vozila
- ugrađeni pričvršćivači prema zahtjevu proizvođača nosila
- visina tovarnog prostora u okvirima tehničkog zahtjeva nosila
- ne prilagođavati nosila prema prostoru vozilu, već prilagodite unutrašnjost vozila zahtjevu nosila
- koristite nosila ELLA prema uputstvu u svrhu smanjivanja svih mogućih opasnih posljedica za pacijenta uzrokovanih nepravilnim rukovanjem

4.2.2. Posluga sa pacijentom

Prije bilo kakvih aktivnosti i radnji sa pacijentom, obavezno je diagnosticiranje stanja unesrećenika i provesti mjere imobilizacije, a tek nakon toga pristupiti pomicanju, dizanju i transportiranju unesrećenika.

4.3. UPUTSTVA ZA RUKOVANJE

4.3.1. SPUŠTANJE NOSILA

Prije spuštanja nosila provedite slijedeće aktivnosti:

1. Provjerite ograde odvojivih nosila 506 – jesu li u sklopljenom položaju !!!!
2. Spustite prazno nosila na tlo na slijedeći način:
 - uhvatite stražnje rukohvate
 - podignite stražnji dio nosila i pričekajte dok prednji kotači ne dodirnu tlo
 - provjerite jesu li prednje noge sklopljene ispod ležaja
 - spustite stražnji dio nosila na tlo

4.3.2. PODIZANJE NOSILA SA UNESREĆENIKOM

1. Prije dizanja nužno je osigurati pacijenta sa sigurnosnim remenjem i podignutim stranicama
2. Poslužiocci moraju biti smješteni na uzglavlju i na nožnom dijelu nosila
3. Pažljivo smjestiti nosila 506 na postolje, te provjeriti da li je brava pričvršćivanje prihvatila gornji dio 506 na postolje 510.

4.3.3. UTOVAR NOSILA 510 U VOZILO

1. Nosila upraviti uzglavljem u otvor vozila
2. Prije utovara nasloniti kotače usmjerivača na utovarni dio vozila.
3. Poslužilac gura nosila u vozilo dok prednje noge ne udare u okvir vozila. Tada poslužitelj oslobađa prednje noge pritiskom desne ručke (dio 7) što omogućuje sklapanje.
4. Nakon toga poslužitelj oslobađa ručku (dio 8) osigurača stražnjih nogu, podigne nosila sa tla i nastavi gurati nosila u vozilo.
Važno: **za čitavo vrijeme radnje teret nosila mora biti pod stalnim nadzorom poslužitelja**
5. Podvozje 510 će se sklopiti prilikom prvog kontakta sa podom vozila
6. Nosila se guraju u vozilo dok se ne uglave u prednji podni učvršćivač
7. Nakon završavanja stražnjeg učvršćivača transport vozilom može početi

NAPOMENA:

Prilikom radnji neophodno je izbjegavati primjenu nasilnih radnji sa nosilima.

4.3.4. ISTOVAR STRETCHERA IZ VOZILA

1. Oslobodite nosila iz sigurnosne brave u vozilu
2. Povucite nosila prema van; noge će automatski iskočiti i zabraviti se u ispruženom položaju
3. Pažljivo provjerite da li je osigurač zabravio nosila u stojećem položaju

VAŽNO: Ne koristite upravljačke ručice (dio 1 i 2) nosila prilikom istovara

4.3.5. Odabir položaja uzglavlja (prikaz dijelova – slika str. 5 - uputstvo 506)

Prije podešavanja položaja obavijestite pacijenta o namjerama

1. Podupirite rukama uzglavlje (dio 13) radi izbjegavanja naglih pokreta
2. Podignite uzglavlje(dio 13) u prvi položaj, isti će se zabraviti automatski
3. Za postavljanje uzglavlja u ostale položaje (5 mogućnosti uz horizontalni položaj) koristiti dio 13 istovremeno rukom pomažući postavljanje uzglavlja u željeni položaj

VAŽNO UPOZORENJE

ZABRANJUJE SE SJEDENJE NA UZGLAVLJU NOSILA POGOTOVO AKO JE UZGLAVLJE U JEDNOM OD UZDIGNUTIH POLOŽAJA

4.3.7. Bočne strane

Za sklapanje bočnih strana potrebno je pritisnuti na osigurač na osovini ogradica, a nakon toga pritiskom na ogradu (dio 10) istu sklopiti uz rub nosila.

Čišćenje i održavanje:

Metalni dijelovi izrađeni su iz visokootpornog poliranog metala.

Ležište nosila predviđeno je za lako čišćenje i proizvedeno je iz materijala koje ne upija krv i druge tjelesne izlučevine.

Nosila ne prati strojem za visokotlačno pranje radi izbjegavanja oštećenja površina.

Preporučljivi program podmazivanja pokretnih dijelova nosila u ovisnosti je od intenziteta korištenja:

- a) 150 intervencija mjesečno – svaki mjesec
- b) 30 – 50 intervencija mjesečno – svaka 2 mjeseca
- c) 1 – 30 intervencija mjesečno – svakih 3 mjeseca

Jamstvo: jamstveni rok za ovaj proizvod iznosi 12 mjeseci od dana ispruke isključivona funkcionalne kvarove.

Kvarovi prouzrokovani nepažnjom odnosno nepravilnim rukovanjem biti će otklonjeni na teret korisnika.

Servis:	De.Ka.Ge. d.o.o. Zagreb, Horvatova 8a
	Tel.01-6570 378 ; 6570 682
	Fax: 01-6570 687



Samoutovariva nosila

506 - 510



SPENCER
Life Support